



MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco



Piano di controlli negli ambienti di lavoro per la verifica delle misure di tutela anti Covid-19



**Misure di auto protezione
da adottare da parte
del personale ispettivo**

TIPOLOGIE DI MASCHERINE



I diversi tipi


Chirurgica

Non aderisce ai contorni del viso e impedisce la fuoriuscita da bocca e naso delle goccioline di secrezioni respiratorie



CAPACITÀ
FILTRANTE

verso
l'esterno
verso chi la
indossa

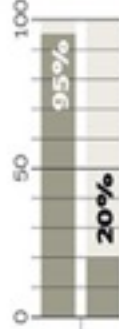


FFP1-FFP2-FFP3 senza valvola Hanno un'elevata protezione. Proteggono chi la indossa e gli altri

FFP1




CAPACITÀ
FILTRANTE

verso
l'esterno
verso chi la
indossa

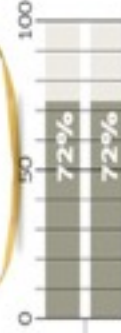

FFP2

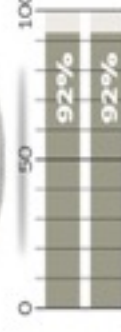

FFP3



FFP1-FFP2-FFP3 con valvola Tutte hanno una caratteristica comune: una migliore respirazione. Proteggono chi la indossa ma non gli altri perché dalla valvola esce il respiro. Indossate da chi è positivo contagia. L'FFP3 ha una protezione quasi totale

FFP1



CAPACITÀ
FILTRANTE

verso
l'esterno
verso chi la
indossa



FFP2



FFP3



MASCHERINE



- Le mascherine rappresentano una misura complementare per il contenimento della trasmissione del virus e non possono in alcun modo sostituire il distanziamento fisico, l'igiene delle mani e l'attenzione scrupolosa nel non toccare il viso, il naso, gli occhi e la bocca".

ISTRUZIONI PER L'USO



- Prima di indossare la mascherina lavare le mani con acqua e sapone per almeno 40-60 secondi o gel igienizzante. Indossarla **toccando solo** gli elastici o i legacci e avendo cura di non toccare la parte interna; posizionare correttamente la mascherina facendo aderire il ferretto superiore al naso e portandola sotto il mento; accertarsi di averla indossata nel verso giusto (solitamente nelle mascherine chirurgiche la parte colorata è quella esterna). Durante l'uso serve continuare ad avere attenzione per la pulizia delle mani; **non va messa in tasca e non poggiata su mobili e ripiani.**

MASCHERINE CHIRURGICHE



Sono le mascherine a uso medico, sviluppate per essere utilizzate in ambiente sanitario e certificate in base alla loro capacità di filtraggio. Rispondono alle caratteristiche richieste dalla norma UNI EN ISO 14683-2019 e funzionano impedendo la trasmissione.

COME SI TOGLIE



- “Non va mai toccata ma bisogna prenderla dai laccetti. Bisogna prendere con le due mani il laccetto inferiore, così si leva senza toccare la pelle del viso con l'esterno della maschera. La regola è quella di evitare di toccarla perché ci si può infettare. Poi ci si lava le mani”.

GUANTI IN LATTICE



GUANTI IN LATTICE



- Il Ministero della Salute chiarisce che l'uso dei guanti - come quello delle mascherine - aiuta a prevenire le infezioni ma solo a determinate condizioni. Diversamente, il dispositivo di protezione può diventare un veicolo di contagio. L'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ci fornisce le indicazioni per un loro utilizzo corretto.

Come si indossano correttamente



- I guanti sterili dovrebbero essere indossati e tolti evitando il più possibile di toccare la parte esterna con le mani, altrimenti è inutile.
- E dunque, per indossarli prendiamoli dal risvolto, con il pollice e l'indice, in modo da toccare sempre e solo la parte interna. Per toglierli, afferrare il primo guanto con l'altra mano, sfilarlo e accartocciarlo nella mano ancora coperta, stringendola a pugno. Per togliere anche il secondo guanto, inserire due dita nel risvolto e sfilarlo girandolo al contrario, in modo che il primo guanto rimanga "intrappolato" e che con le mani si possa toccare solo la parte interna, ora rovesciata verso l'esterno.
- **Ricordiamo che sono prodotti monouso e dunque non devono essere puliti e riutilizzati: vanno gettati via.**

I GUANTI MONOUSO NON SOSTITUISCONO L'IGIENE DELLE MANI



- Anche indossando i guanti, è importante continuare a eseguire una frequente igienizzazione delle mani, lavandole con acqua e sapone o - quando ciò non è possibile - con le soluzioni disinfettanti attualmente in commercio (gel, salviette ecc.).
- Il lavaggio dev'essere accurato e durare **almeno 60 secondi.**

DURANTE L'USO DEI GUANTI



- **NON TOCCARE OCCHI NASO E BOCCA**
- Lo scopo dei guanti in lattice è quello di impedire che il virus eventualmente presente sulle superfici che tocchiamo entri in contatto con il nostro corpo.
- Se quindi, con i guanti addosso, ci tocchiamo **occhi, naso o bocca** - che sono vie privilegiate per l'ingresso del virus nell'organismo - ne annulliamo l'effetto.

DOVE SI BUTTANO I GUANTI



- Una volta utilizzati, a prescindere dal materiale di cui sono fatti (generalmente è lattice), i guanti devono essere smaltiti con i **rifiuti indifferenziati**

KIT VIGILI del FUOCO



KIT VIGILI del FUOCO



ALLA FINE



- Procedere alla igienizzazione della suola delle scarpe prima di salire in auto
- Procedere alla igienizzazione dei guanti prima di toglierli
- Avere a disposizione DPI idonei



**GRAZIE PER LA VOSTRA
ATTENZIONE**